

CARRIERE®
SLX® 3D



LA REVOLUTION DE LA PERFORMANCE

Conçue pour vous, votre
équipe et vos patients,
sans aucun compromis.



 **HENRY SCHEIN®**
ORTHODONTICS



1

FAITES TOURNER

Une simple rotation de l'instrument dédié, le capot glisse en position ouverte et verrouillée.

2

UNE COUVERTURE TOTALE

Le capot recouvre complètement la gorge et offre un contrôle des rotations inégalé, pour vous aider à terminer le traitement plus rapidement.

3

SENTEZ LA DIFFÉRENCE

Les brackets les plus lisses que nous ayons jamais conçus. Incroyablement doux, et confortables pour vos patients.

UNE MAÎTRISE CLINIQUE SANS PRÉCÉDENT

Découvrez le système de brackets Carriere® SLX 3D™

L'engagement en faveur de l'efficacité au cabinet et de l'excellence des soins apportés aux patients se révèle pleinement à travers le design, le confort et les performances exceptionnelles du **système Carriere® SLX® 3D™**.



■ Finies les plicatures

Grâce à des valeurs de torque précises et éprouvées, des épaisseurs in/out optimisées et une profondeur de gorge maîtrisée, le **bracket SLX 3D™** est conçu pour réduire au maximum le pliage de fil durant tout le traitement, y compris e phrase de finition.

■ **INCISIVES**
Centrales
& cuspides

■ **BICUSPIDES**
de tailles
moyennes

■ **LATÉRALES**
Inférieures &
supérieures étroites

■ Une taille adaptée pour chaque dent

Le système de **brackets SLX 3D™** propose des brackets étroits pour les dents étroites, et des brackets larges pour les dents larges — car la taille compte lorsqu'il s'agit d'assurer un contrôle de rotation rapide et précis pour un positionnement dentaire optimal.


■ **3D SLX™ Clear**
Pilots en forme de
champignon pour une
rétention sécurisée



■ Des glissières de sécurité

Notre technologie exclusive **Adhesive Guard Rail™ (AGR)** dirige l'excès d'adhésif en mésial et en distal, pour un nettoyage rapide et facile tout en protégeant le capot.

■ **3D SLX™ Métal**
Pilots
micro-sablés

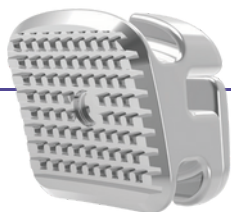

■ Facile à poser, facile à retirer

Nos bases à contours composés sont conçues pour “épouser parfaitement” la dent, tandis que les bords chanfreinés facilitent un retrait rapide et propre. Excellente rétention.

■ **EZ TWIST**
Ouverture par
simple rotation



■ Il suffit de faire tourner

Notre nouvelle fonction exclusive **EZ Twist®** apporte un niveau de satisfaction pour votre équipe et de confort pour vos patients.

JUST DO THE TWIST

UNE SÉQUENCE INNOVANTE DE 3 ARCS

SAGITTAL FIRST

Au cœur de la philosophie de traitement SAGITTAL FIRST™ se trouve l'utilisation de l'appareil Carriere® Motion 3D™ ou Motion Pro™ pour corriger les décalages antéro-postérieurs et stimuler le mouvement initial des dents.

Cela favorise une transition plus aisée vers des fils plus épais plus tôt dans le traitement, réduit la durée du port d'appareils et raccourcit le temps total de traitement.

M-SERIES™ WIRES

- Permettre un protocole simplifié de progression des fils
- Réduire le nombre de fils utilisés
- Terminer les cas en environ 12 mois

3–6 MOIS

MOTION 3D™ ou Motion Pro™

Établissement d'une base en Classe I



8–10 MOIS

M-SERIES WIRES

M1

M2

M3



SÉQUENCE DE FILS M-SERIES – POUR SYSTÈMES DE BRACKETS MÉTALLIQUE

	NOM DU FIL	DESCRIPTION	OBJECTIF	TEMPS DE TRAITEMENT	NOMBRE DE RENDEZ-VOUS intervalles de 5 à 6 semaines	NUMÉRO D'ARTICLE
1	M-1	Fil .015 Cu Nitium 27° avec système de pose EZ Stops™	Amorcer le nivellement, l'alignement et les rotations	5-6 semaines	1 RDV	103-M1
2	M-2	Fil .020 x .020 Cu Nitium 35° avec système de pose EZ Stops	Finaliser le nivellement, alignement et les rotations. Finalisation de la forme d'arcade, contrôle du troisième ordre avec initialisation du torque	6 à 18 semaines, selon la complexité et le jugement clinique	2-3 RDV	103-M2
3	M-3	Fil .019 x .025 en bêta-titane	Détails et finitions	8-12 semaines	2-3 RDV	103-M3B

SÉQUENCE DE FILS M-SERIES – POUR SYSTÈMES DE BRACKETS CÉRAMIQUE

Suivez la séquence en 3 arcs et ajoutez l'arc ci-dessous avant d'utiliser le M-3

	NOM DU FIL	DESCRIPTION	OBJECTIF	TEMPS DE TRAITEMENT	NOMBRE DE RENDEZ-VOUS intervalles de 5 à 6 semaines	NUMÉRO D'ARTICLE
	M-2.5	Fil .019 x .025 Cu Nitium 35° avec système de pose EZ Stops	Pour l'alignement final des brackets avant l'utilisation du fil M-THREE avec des brackets céramiques	3-4 semaines	1 RDV	103-M2.5

GESTION OPTIMISÉE DES STOCKS

MAXILLAIRE							SLX 3D Métal		SLX 3D Clear	
	Description	Code Couleur	Dent#	Torque	Angle	Antirotation	.022 R	.022 L	.022 R	.022 L
CENTRALE	—	Noir	U1	+17°	+5°	0°	777- U R1H -10	777- U L1H -10	776-UR1H-5	776-UL1H-5
	—	Noir	U1	+12°	+5°	0°	777- U R1-10	777- U L1-10	776-UR1-5	776-UL1-5
LATERALE	—	Rose	U2	+12°	+8°	0°	777-UR2H-10	777-UL2H-10	776-UR2H-5	776-UL2H-5
	—	Rose	U2	+8°	+8°	0°	777-UR2-10	777-UL2-10	776-UR2-5	776-UL2-5
CANINES	Crochet	Vert	U3	+7°	+9°	0°	777-UR3H-HK-10	777-UL3H-HK-10	776-UR3H-HK-5	776-UL3H-HK-5
	Crochet	Vert	U3	0°	+9°	0°	777-UR3-HK-10	777-UL3-HK-10	776-UR3-HK-5	776-UL3-HK-5
PRÉMOLAIRES	—	Violet	U4& 5's	-7°	0°	0°	777-U45-10	777-U45-10	776-U45-5	776-U45-5
	Crochet	Violet	U4& 5's	-7°	0°	0°	777-UR45-HK-10	777-UL45-HK-10	776-UR45-HK-5	776-UL45-HK-5
1ère MOLAIRE	—	Blanc	U6's	-14°	0°	12°DO	977-UR6-HK-10	977-UL6-HK-10 9	976-UR6-5	976-UL6-5
2nd MOLAIRE	—	Gris	U7's	-14°	0°	10°DO	977-UR7-HK-10	77- UL7- H K-10	—	—

MANDIBULAIRE							SLX 3D Métal		SLX 3D Clear	
	Description	Code Couleur	Dent#	Torque	Angle	Antirotation	.022 R	.022 L	.022 R	.022 L
ANTÉRIEUR	—	Jaune	L1&2's	-1°	0°	0°	777- L12 -10	777- L12 -10	776-L12-5	776-L12-5
	—	Jaune	L1&2's	-6°	0°	0°	777- L12 L-10	777- L12 L-10	776-L12L-5	776-L12L-5
CANINES	Crochet	Bleu	L3	0°	+5°	0°	777-LR3-HK-10	777-LL3-HK-10	776-LR3-HK-5	776-LL3-HK-5
	Crochet	Bleu	L3	-6°	+5°	0°	777-LR3L-HK-10	777-LL3L-HK-10	776-LR3L-HK-5	776-LL3L-HK-5
PRÉMOLAIRES	—	Gris	L4	-12°	+2°	0°	777-LR4-10	777-LL4-10	776-LR4-5	776-LL4-5
	Crochet	Gris	L4	-12°	+2°	0°	777-LR4-HK-10	777-LL4-HK-10	776-LR4-HK-5	776-LL4-HK-5
2nd PRÉMOLAIRE	—	Rouge	L5	-17°	+2°	0°	777-LR5-10	777-LL5-10	776-LR5-5	776-LL5-5
	Crochet	Rouge	L5	-17°	+2°	0°	777-LR5-HK-10	777-LL5-HK-10	776-LR5-HK-5	776-LL5-HK-5
1ère MOLAIRE	Crochet	Blanc	L6's	-25°	0°	2°DO	977-LR6-HK-10	977-LL6-HK-10	—	—
2nd MOLAIRE	Crochet	Jaune	L7's	-10°	0°	0°	977-LR7-HK-10	977- LL7- H K-10	—	—

CARRIERE® KITS (Appel pour disponibilité)							SLX 3D Métal		SLX 3D Clear	
	Description	Quantité/ set	Total brackets				.022		.022	
Standard TORQUE	Haut/Bas 5x5 kit avec crochet 3's	1	20				777-KIT-HK		776-KIT-HK	
	Haut/Bas 5x5 kit avec crochet 3's, 4's, 5's	1	20				777-KIT-HKS		776-KIT-HKS	
	Haut/Bas 6x6 kit avec crochet 3's & 6's	1	24				777-KIT6-HK		776-KIT6-HK	
	Haut/Bas 6x6 kit avec crochet 3's, 4's, 5's, 6's	1	24				777-KIT6-HKS		776-KIT6-HKS	

Les tubes buccaux autoligaturants SLX 3D™ intègrent toutes les fonctionnalités exceptionnelles des brackets SLX 3D™, afin de compléter ce système d'appareillage révolutionnaire.

Encore une innovation signée HSO : des tubes céramiques clairs pour les premières molaires supérieures.

Vos patients peuvent désormais sourire toute la journée, chaque jour, en toute confiance, grâce à la solution esthétique complète la plus économique du marché.



LA REVOLUTION SAGITTAL FIRST



Simplifiez et raccourcissez vos traitements. Des résultats prévisibles et reproductibles.

La philosophie **SAGITTAL FIRST™** est une approche novatrice qui simplifie et raccourcit les traitements de **Classe II** et de **Classe III**.

Elle utilise l'**appareil Motion 3D™** ou **Motion Pro™** pour traiter la dimension antéro-postérieure dès le début, avant la pose des brackets ou des aligneurs.

En corrigeant d'abord la partie la plus complexe du traitement, vous pouvez obtenir une base en **Classe I** en **3 à 6 mois**, réduisant ainsi la durée totale du traitement d'au moins 6 mois.

PRÉVISIBLE

Motion 3D™ ou Motion Pro™

INNOVANT

Bracket SLX 3D™

SANS ATTACHE

Aligneur



ENVIE DE VOUS FORMER ?

Contactez notre service événements



06 76 87 13 37



evenements@orthoplus.fr

Programme
**FORMATION
CARRIERE®**



28, rue Ampère
91430 IGNY



+33 1 69 41 90 28



drc@orthoplus.fr



orthoplus.fr