




3 À 8 ANS




Profil patient	Dysfonction ventilatoire		Dysfonction linguale
 <p>Dolicho</p>	TMO	Intercepteur Pédiatrique MyoTonic	TMO MyoTonic
 <p>Brachy</p>	TMO	Intercepteur Pédiatrique MyoFlex	TMO MyoFlex
 <p>Méso</p>	TMO	Intercepteur Pédiatrique MyoFlex MyoTonic	TMO MyoFlex MyoTonic

8 ANS ET +

Dysfonction ventilatoire	Dysfonction linguale
TMO Intercepteur	TMO

PARAFONCTIONS & POINTS DE VIGILANCE

	3 à 8 ans	8 ans et +
Comport. hypertonique	Intercepteur Pédiatrique	Intercepteur
Succion structures endobuccales	TMO MyoTonic MyoFlex	TMO
Sevrage de succion non nutritive	Intercepteur Pédiatrique MyoTonic MyoFlex TMO	
Profil TROS associé	<p>TMO⁺</p> <p>Ajout d'une légère avancée mandibulaire pour augmenter la lumière pharyngée</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Vigilance chez les enfants tendance bout à bout</p> </div>	