



S'adapter au profil fonctionnel de mon patient

Comment choisir mon
Éducateur MyoFonctionnel ?

Choisir l'EMF qui correspond à mes observations oro-myofonctionnelles et au profil facial et musculaire de mon patient.



3 À 8 ANS



Profil patient	Dysfonction ventilatoire			Dysfonction linguale	
 Dolicho	TMO	Intercepteur Pédiatrique	Myotonic	TMO	Myotonic
 Brachy	TMO	Intercepteur Pédiatrique	Myoflex	TMO	Myoflex
 Méso	TMO	Intercepteur Pédiatrique	Myotonic Myoflex	TMO	Myoflex Myotonic

8 ANS ET +

Dysfonction ventilatoire	Dysfonction linguale
TMO Intercepteur	TMO

PARAFONCTIONS & POINTS DE VIGILANCE

	3 à 8 ans	8 ans et +
Comport. hypertonique	Intercepteur Pédiatrique	Intercepteur
Succion structures endobuccales	Myotonic Myoflex TMO	TMO ⁺
Sevrage de succion non nutritive	Intercepteur Pédiatrique Myotonic Myoflex TMO	
Profil TROS associé	TMO⁺ Ajout d'une légère avancée mandibulaire pour augmenter la lumière pharyngée  Vigilance chez les enfants tendance bout à bout	